


Manual de uso del Cinturón de datos

- Extraer todos los parches adhesivos.
- Apretar la banda de datos alrededor de la cintura con el velcro.
- Utilizar el cinturón de datos como se muestra a continuación.

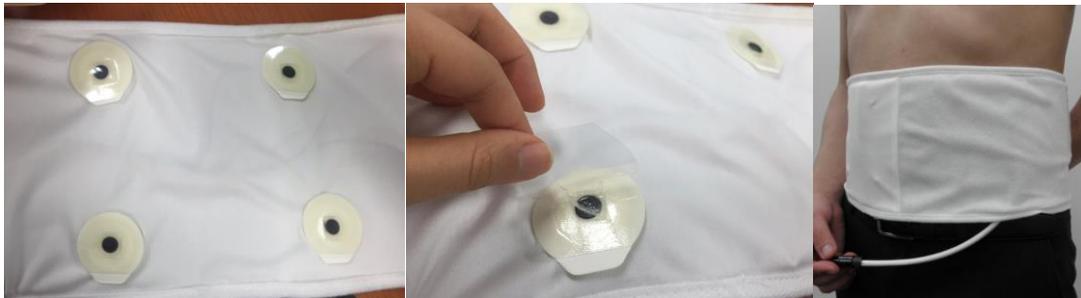

! **PRECAUCIÓN** No abrochar el cinturón de datos encima de la ropa.

Medidas del Cinturon

	Longitud del cinturón	Tamaño de la cintura del paciente
Tamaño M	1030 mm	Menos de 920 mm
Tamaño L	1500 mm	Más de 920 mm

Después de colocar los parches sensores en el paciente, conectar el cable al Receptor MiroCam® como se ilustra en la siguiente imagen y confirmar que en la pantalla principal se muestran dos iconos   alternativamente.



! **PRECAUCIÓN** Si la banda de datos o el cable de datos no se conectan al receptor o no reciben la señal, deben sustituirse.