

Prueba Inmunoquímica OC-Light® S FIT



CONOZCA MÁS
DE ESTE PRODUCTO
ESCANEO EL
CÓDIGO QR



OC-Light S FIT es una prueba inmunoquímica fecal manual para la detección de sangre oculta en heces (hemoglobina humana) que puede provocar cáncer colorrectal.

- La prueba OC-Light® S FIT es un procedimiento de tira simple con resultados cualitativos en 5 minutos
- Utiliza oro coloidal para mejorar la intensidad y claridad de la línea de prueba.
- OC-Light® S FIT no requiere restricciones dietéticas o medicinales.
- Permite al médico o al paciente recolectar fácilmente una muestra y devolverla al laboratorio o al consultorio del médico para obtener resultados rápidos y precisos.




Características

- Fácil operación
- Alta sensibilidad a la hemoglobina (50 ng/mL, casi igual a 10 µg/g de heces)
- Resultado en 5 minutos
- Operación de muestreo fácil e higiénica

Procedimiento

1. Abra la tapa verde girando hacia la izquierda y tirando hacia arriba.
2. Recoja la muestra fecal raspando ampliamente la superficie de las heces con la sonda de muestras.
3. Cierre la botella de muestra insertando la sonda de muestra y enroscando la tapa firmemente hacia la derecha. Agite vigorosamente la botella de muestreo. NO REABRIR.
4. Abra la tapa blanca girando hacia la izquierda.
5. Introduzca la tira de prueba en sentido que indica la flechas.
6. Espere el resultado.

Consumibles	Código
OC-Light™ S FIT TEST KIT (50 Tiras de Prueba, 50 Botellas para Muestra, 50 Papeles Recolectores)	FOB50

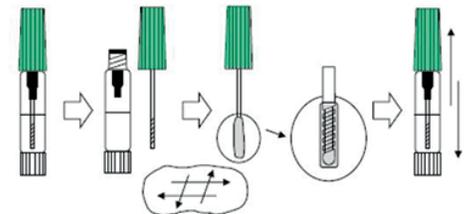

Contacto.

Mayra Yañez Oliver
Gerente de Ventas Diagnósticos
Gastroenterología
email: mayra.yanez@endomedica.com
móvil: 55.5990.2604



polymedco

GASTROENTEROLOGÍA

ENDOMÉDICA
Tecnología para la salud
Apoyando a la comunidad médica desde 1986

www.endomedica.com

| tel. 55 4738 8800 (CDMX) | tel. 81 8123 2499 (Mty.) | tel. 33 2002 7700 (Guad.) | tel. 222 419 7189 (Pue.)