


Escoja un catéter que tenga una punta fácilmente moldeable.

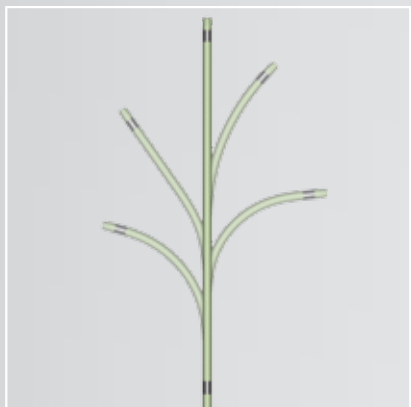

Ahora
disponible con
dos marcadores
radiopacos.

Cantata[®]
MICROCATÉTER SUPERSELECTIVO



www.cookmedical.com



Facilidad de acceso al objetivo anatómico

La trenza de acero inoxidable en toda la longitud permite moldear manualmente la punta sin calor. El revestimiento hidrofílico garantiza una introducción sin inconvenientes y facilidad de maniobra durante múltiples pasajes.

- La punta puede moldearse manualmente sin vapor para crear una curva que se complemente con la anatomía o colocación específica.
- La estructura de acero inoxidable proporciona control a la vez que mantiene su resistencia al pliegue.



Soporte y control del desplazamiento

Una transición suave y, a la vez, bien definida, desde el soporte que ofrece el extremo proximal hasta la punta flexible, la proporcionan cinco zonas de transición.

- La trenza en toda la longitud permite un preciso control de torque con una gran capacidad de respuesta.
- El revestimiento hidrofílico garantiza una introducción sin inconvenientes y mantiene la facilidad de maniobra a través de varios pasajes.



El diámetro interno y los tamaños Fr se indican en el conector del catéter.**

Despliegue eficaz y confiable

- Compatibilidad con Lipiodol®, DMSO y alcohol, que permite su uso en una amplia variedad de aplicaciones.
- Gran diámetro interno que puede admitir esferas, partículas de embolización o microespirales, incluidas las espirales de embolización de 0,018 pulgadas (0,46 mm).

Cantata (Fr)	DI (pulgadas/mm)	Caudal (ml/s)*	Presión (psi/kPa)	Tamaño máximo de partícula (no comprimible) (µm)
2,5	0,021/0,53	1,6	1200/8274	500
2,8	0,025/0,64	3,5	900/6205	700

*Omnipaque™ 100 %

**Los primeros conectores del microcatéter Cantata estaban marcados para mostrar el mayor tamaño compatible de guía. A partir del año 2013, los conectores mostrarán el diámetro interno real. Los clientes pueden recibir cualquiera de los tipos de catéter Cantata durante el tiempo que dure la transición al nuevo sistema de marcado. Consulte la etiqueta del producto para obtener información sobre el diámetro interno.

Lipiodol es una marca comercial registrada de Guerbet SA.
Omnipaque es una marca comercial de GE Healthcare, Inc.

“La capacidad de moldear correctamente el extremo del microcatéter Cantata hace que sea más fácil el acceso a una anatomía tortuosa.”

– Dr. Previn Diwakar, radiólogo intervencionista, Kent and Canterbury Hospital, East Kent Hospitals University, Canterbury, Reino Unido

NOTAS DE UN CASO

Se ingresó a un paciente de 22 años con insuficiencia renal y se le realizó una biopsia. Un angiograma posterior a la biopsia no reveló signos de hemorragia; no obstante, una semana después, se volvió a ingresar al paciente con hematuria e hipotensión y, además, se visualizó una hemorragia en una rama de la arteria renal izquierda por medio de un angiograma de emergencia (Fig. 1). Luego de formar una ligera curvatura en la punta del microcatéter Cantata para que sirviera durante el posicionamiento, se hizo avanzar el microcatéter Cantata coaxialmente a través de un catéter 5 Fr (Fig. 2). El microcatéter Cantata se colocó en la ubicación precisa de la hemorragia (Fig. 3), y se colocó una espiral de 0,018 pulgadas (0,46 mm) en el sitio de la hemorragia (Fig. 4). Se identificó una rama lateral que también estaba involucrada en la hemorragia, y se colocó una segunda espiral, lo que sirvió para lograr la oclusión y el cese de la hemorragia (Fig. 5).



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

Referencia	Referencia de producto	Fr	DI (pulgadas/mm)	Longitud (cm)	Volumen del catéter (ml)	DI mínimo de catéter angiográfico compatible (pulgadas/mm)
Microcatéter superselectivo Cantata® (un marcador radiopaco)						
G54529	MCS-2.5-NT-100-15-HP	2,5	0,021/0,53	100	0,45	0,035/0,89
G54530	MCS-2.5-NT-110-15-HP	2,5	0,021/0,53	110	0,48	0,035/0,89
G54531	MCS-2.5-NT-135-15-HP	2,5	0,021/0,53	135	0,53	0,035/0,89
G54532	MCS-2.5-NT-150-15-HP	2,5	0,021/0,53	150	0,57	0,035/0,89
G54533	MCS-2.8-NT-100-15-HP	2,8	0,025/0,64	100	0,54	0,038/0,97
G54534	MCS-2.8-NT-110-15-HP	2,8	0,025/0,64	110	0,57	0,038/0,97
G54535	MCS-2.8-NT-135-15-HP	2,8	0,025/0,64	135	0,65	0,038/0,97
G54536	MCS-2.8-NT-150-15-HP	2,8	0,025/0,64	150	0,70	0,038/0,97
Microcatéter superselectivo Cantata® Duo (dos marcadores radiopacos)						
G23799	MCS-2.5-NT2-100-15-HP	2,5	0,021/0,53	100	0,45	0,035/0,89
G23801	MCS-2.5-NT2-135-15-HP	2,5	0,021/0,53	135	0,53	0,035/0,89
G23802	MCS-2.5-NT2-150-15-HP	2,5	0,021/0,53	150	0,57	0,035/0,89
G23803	MCS-2.8-NT2-100-15-HP	2,8	0,025/0,64	100	0,54	0,038/0,97
G23805	MCS-2.8-NT2-135-15-HP	2,8	0,025/0,64	135	0,65	0,038/0,97
G23806	MCS-2.8-NT2-150-15-HP	2,8	0,025/0,64	150	0,70	0,038/0,97

Algunos productos o números de parte pueden no estar disponibles en todos los mercados. Comuníquese con su representante local de Cook o con el centro de atención al cliente para obtener detalles al respecto.

Customer Service

EMEA: EDI - www.cookmedical.com/edi.do
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001633, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

www.cookmedical.com

Americas: EDI - www.cookmedical.com/edi.do
Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
E-mail: orders@cookmedical.com

Australia:
Phone: +61 738411188, 1800777222, Fax: +61 738411288, 1800077283
E-mail: cau.custserv@cookmedical.com

