


Sistema de Stent Coronario Liberador de Sirolimus Yukon Choice PC

Yukon Choice PC se conoce como un stent liberador de fármacos coronarios de polímero biodegradable. Es accesible con un inmunosupresor bien estudiado y clínicamente probado. La tecnología patentada de este producto le permite trabajar bien con depósitos. Yukon Choice PC permite una menor exposición sistémica y una mejor endotelización del fármaco. Su uso puede prevenir la ruptura de la matriz de doble fármaco cuando se está realizando una expansión de stent. Este es el SLF más estudiado que se ofrece con seguridad y eficacia.

Yukon Choice PC es un stent liberador de fármacos coronarios de polímero biodegradable. El fármaco es Sirolimus, que es un inmunosupresor bien estudiado y clínicamente probado.

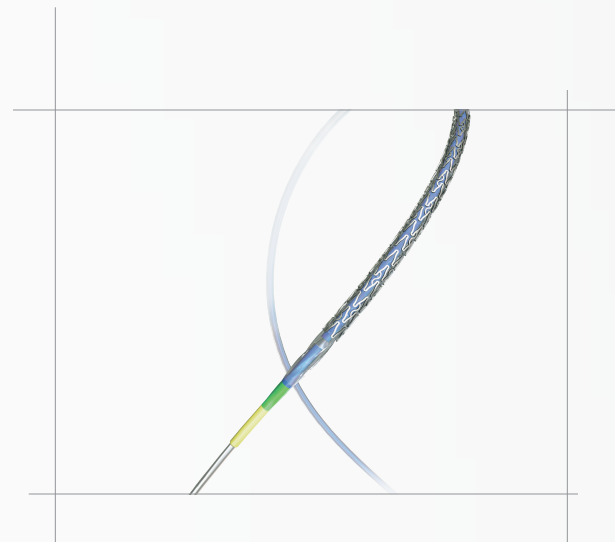

Balón	Tamaño del Stent [mm] & Número de Artículo							
Ø [mm]	8	12	16	18	21	24	28	32
Ø 2,00	YCPC2008	YCPC2012	YCPC2016	YCPC2018	YCPC2021	YCPC2024	YCPC2028	YCPC2032
Ø 2,50	YCPC2508	YCPC2512	YCPC2516	YCPC2518	YCPC2521	YCPC2524	YCPC2528	YCPC2532

Balón	Tamaño del Stent [mm] & Número de Artículo								
Ø [mm]	8	12	16	18	21	24	28	32	40
Ø 2,75	YCPC2708	YCPC2712	YCPC2716	YCPC2718	YCPC2721	YCPC2724	YCPC2728	YCPC2732	YCPC2740
Ø 3,00	YCPC3008	YCPC3012	YCPC3016	YCPC3018	YCPC3021	YCPC3024	YCPC3028	YCPC3032	YCPC3040
Ø 3,50	YCPC3508	YCPC3512	YCPC3516	YCPC3518	YCPC3521	YCPC3524	YCPC3528	YCPC3532	YCPC3540
Ø 4,00	YCPC4008	YCPC4012	YCPC4016	YCPC4018	YCPC4021	YCPC4024	YCPC4028	YCPC4032	YCPC4040

* Comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente para conocer los tamaños disponibles.

Cuadro de cumplimiento

Balón Ø [mm]	Presión de Inflado [bar or 10 ⁵ Pascal]														
	6	7	8	NP	10	11	12	13	14	15	RBP	17	18	19*	20*
Ø 2,00	1,90	1,94	1,97	2,00	2,03	2,07	2,10	2,13	2,17	2,20	2,23	2,27	2,35	2,38	2,41
Ø 2,50	2,40	2,43	2,47	2,50	2,54	2,57	2,60	2,64	2,67	2,71	2,74	2,77	2,81	2,84	2,88
Ø 2,75	2,65	2,68	2,72	2,75	2,78	2,82	2,85	2,88	2,92	2,95	2,98	3,01	3,28	3,31	3,34
Ø 3,00	2,89	2,93	2,97	3,00	3,04	3,08	3,12	3,15	3,19	3,23	3,26	3,30	3,34	3,37	3,41
Ø 3,50	3,37	3,42	3,46	3,50	3,54	3,58	3,63	3,67	3,71	3,75	3,79	3,84	3,88	3,92	3,96
Ø 4,00	3,85	3,90	3,95	4,00	4,05	4,10	4,16	4,21	4,26	4,31	4,36	4,41	4,46	4,51	4,56

Contacto.

Ana María Fernández
Subdirector Comercial Intervencionismo
email: anamaria.fernandez@endomedica.com
tel 55.4738.8800 ext. 8810 | cel 55.5990.2701

translumina

CARDIOLOGÍA
INTERVENCIONISTA

ENDOMÉDICA
Tecnología para la salud
Apoyando a la comunidad médica desde 1986

www.endomedica.com

| tel. 55 4738 8800 (CDMX) | tel. 81 8123 2499 (Mty.) | tel. 33 2002 7700 (Guad.) | tel. 222 419 7189 (Pue.)