

Espiral de embolización desprendible

Retracta™

Retracta™ es una espiral desprendible de 0.035 pulgadas (0.89 mm) que se puede retraer completamente.


Úsela inmediatamente al sacarla del empaque. Retracta es fácil de usar y requiere un tiempo de preparación mínimo. Es una opción económica que le proporciona otra opción viable para tratar a los pacientes.

Use una opción desprendible basada en tecnología Nester® de platino.

El platino blando de Retracta le permite compactar las espirales de manera bien ajustada. Use Retracta con las populares espirales Nester y Tornado® para controlar el tamaño del émbolo.

Desprenda con precisión cuando esté listo.

Coloque la espiral y despréndala. O bien, si necesita cambiar su ubicación, retraiga y coloque nuevamente la espiral antes de desprenderla. Bajo fluoroscopia, el cambio en la radiopacidad en la zona de separación indica dónde está la espiral. Luego, se puede inyectar contraste para confirmar que la espiral está colocada correctamente.

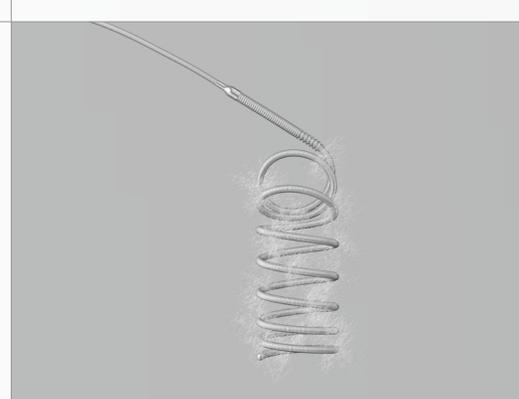

- Las espirales de embolización desprendibles Retracta están diseñadas para embolización arterial y venosa en la vasculatura periférica.
- Se puede hacer avanzar las espirales y reubicarlas completamente antes de desplegarlas.

Número de Orden	DI del catéter y diámetro del orificio terminal recomendados (pulgadas/mm)	Longitud del émbolo extendido (cm)	Diámetro del émbolo espiralado (mm)	Número aproximado de lazos
MWCER-35-7-6	0.035/0.89	7	6	3.7
MWCER-35-7-8	0.035/0.89	7	8	2.8
MWCER-35-7-10	0.035/0.89	7	10	2.2
MWCER-35-7-12	0.035/0.89	7	12	1.9
MWCER-35-7-14	0.035/0.89	7	14	1.6
MWCER-35-7-16	0.035/0.89	7	16	1.4
MWCER-35-7-18	0.035/0.89	7	18	1.2
MWCER-35-7-20	0.035/0.89	7	20	1.1
MWCER-35-14-6	0.035/0.89	14	6	7.4
MWCER-35-14-8	0.035/0.89	14	8	5.6
MWCER-35-14-10	0.035/0.89	14	10	4.5
MWCER-35-14-12	0.035/0.89	14	12	3.7
MWCER-35-14-14	0.035/0.89	14	14	3.2
MWCER-35-14-16	0.035/0.89	14	16	2.8
MWCER-35-14-18	0.035/0.89	14	18	2.5
MWCER-35-14-20	0.035/0.89	14	20	2.2

Contacto.

Diego Amigo Sordo
Gerente de Línea
Intervencionismo Periférico
email: diego.amigo@endomedica.com
oficina: 4738-8860



www.endomedica.com

| tel. 55 4738 8800 (CDMX) | tel. 81 8123 2499 (Mty.) | tel. 33 2002 7700 (Guad.) | tel. 222 419 7189 (Pue.)

INTERVENCIONISMO
RADIOLÓGICO



Ayorando a la comunidad médica desde 1986