

Más control, menos estrés.




Evolution® Esophageal

STENT ESOFÁGICO DE LIBERACIÓN CONTROLADA

Indicación
para casos
benignos*




Más control,
menos estrés.

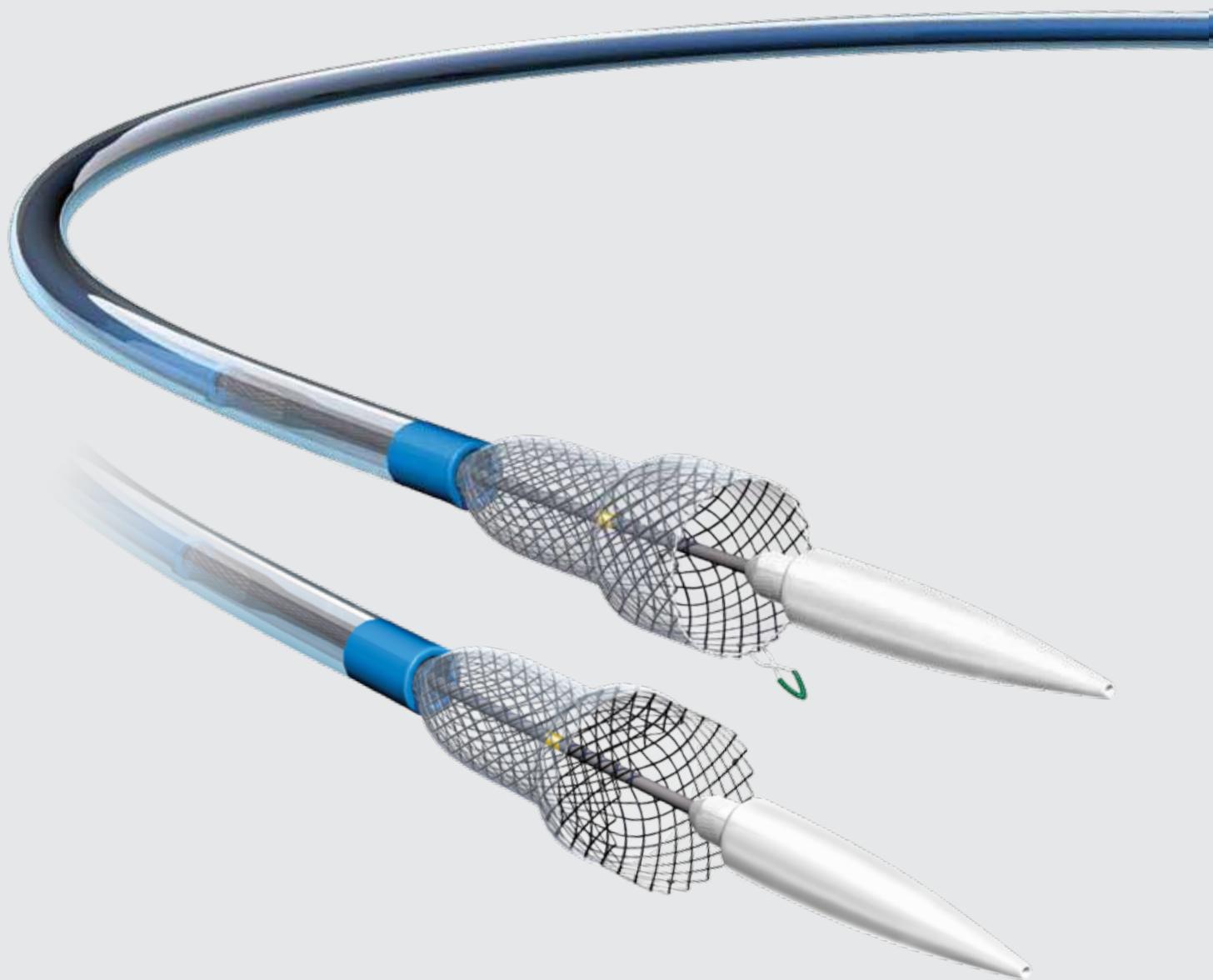

Diseño «evolucionario»

Revestido con silicona por dentro y por fuera, el Evolution está diseñado para reducir el crecimiento hacia el interior y reducir la impactación del bolo alimenticio. Los rebordes proximal y distal, ya sean recubiertos o no recubiertos, fijan la posición del stent y disminuyen el riesgo de migración. El bucle de lazo proximal ofrece la libertad de cambiar la posición del stent parcialmente recubierto inmediatamente después de su colocación, mientras que el stent totalmente recubierto dispone de lazos visibles de agarre proximal y distal que permiten tanto el cambio de posición como la extracción hasta 8 semanas después de la colocación.

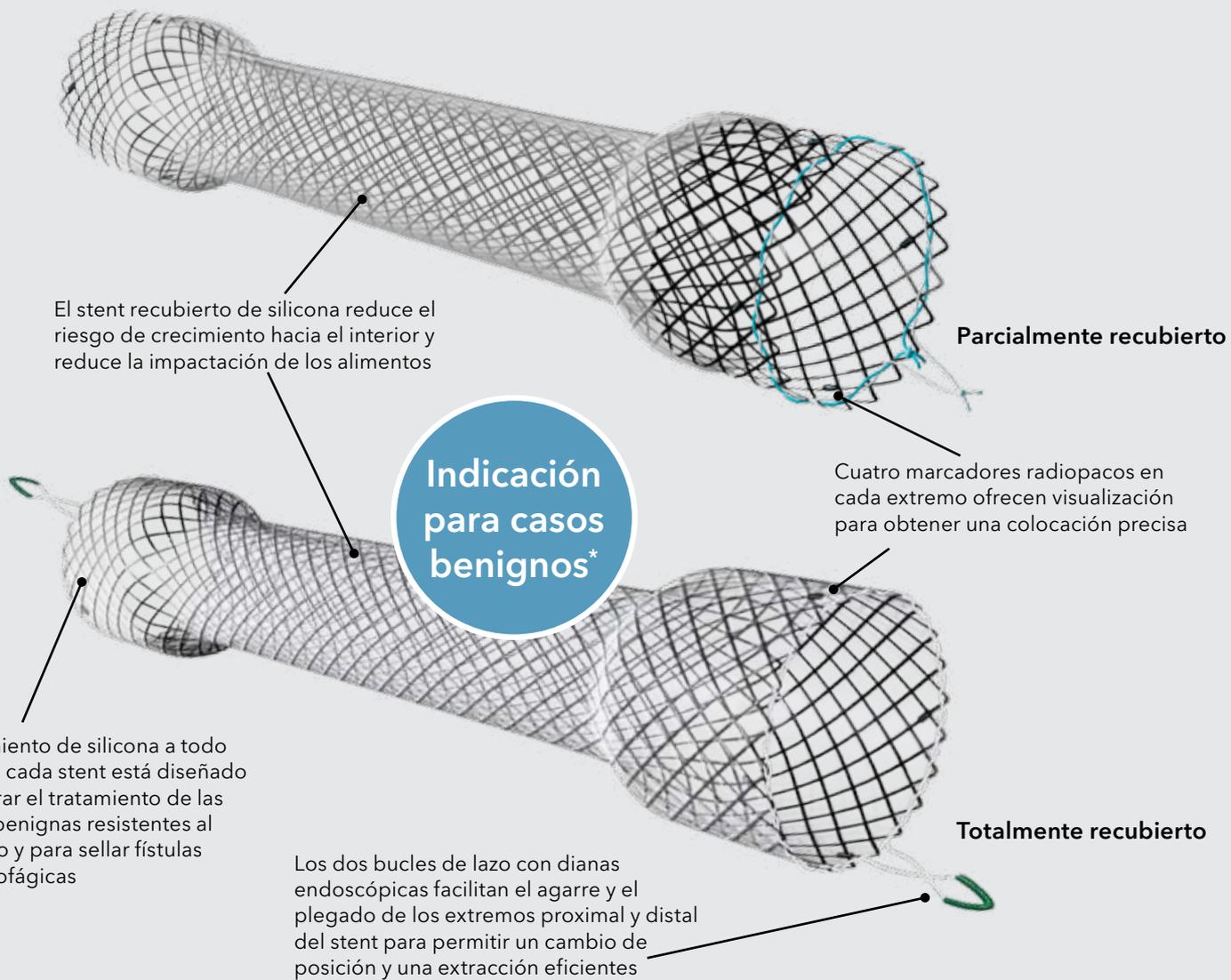

Control «evolucionario»


Cada apriete del gatillo permite controlar de manera precisa el despliegue y la recaptura del stent. Un simple accionamiento del botón direccional permite pasar fácilmente de la liberación a la recaptura. Hay incluso una marca de referencia de «punto de no retorno» que indica cuándo ya no es posible capturar el stent.



* Indicación para casos benignos solamente en el caso del stent totalmente recubierto.

Recubrimiento «evolucionario»

Con el fin de ofrecerle la mayor variedad de opciones de tratamiento, los stents esofágicos Evolution Esophageal vienen parcial o totalmente recubiertos. Hay incluso un stent totalmente recubierto específicamente indicado para las estenosis benignas. Todos ellos se despliegan de forma suave y fiable, gracias al sistema de introducción de liberación controlada, que reduce el estrés.

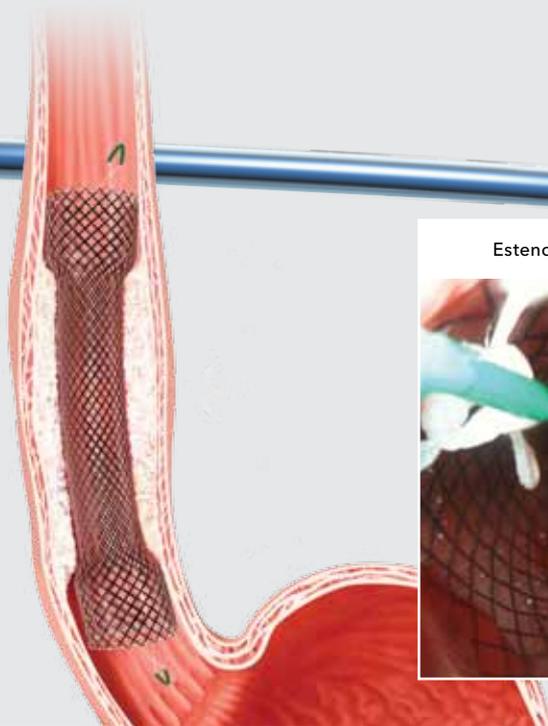

Stent parcialmente desplegado



Posición del stent inmediatamente después del despliegue



Imagen endoscópica cortesía del Dr. Inder Mainie,
Belfast City Hospital (Irlanda del Norte)

Imágenes fluoroscópicas cortesía del Dr. Marc Giovannini,
Institut Paoli-Calmettes, Marsella (Francia)

Especificaciones del producto

Totalmente recubierto

Para mantener la permeabilidad luminal del esófago en casos de: obstrucción causada por neoplasias malignas intrínsecas o extrínsecas, estenosis benignas resistentes al tratamiento, o para sellar fístulas traqueoesofágicas.

Se suministra estéril y es desechable; indicado para un solo uso.

Referencia	Referencia de producto	Diámetro del cuerpo (mm)	Diámetro del reborde (mm)	Longitud del stent (cm)	Diámetro del sistema de introducción (mm)
G55167	EVO-FC-R-18-23-8-E	18	23	8	8
G55168	EVO-FC-R-18-23-10-E	18	23	10	8
G55169	EVO-FC-R-18-23-12-E	18	23	12	8
G55170	EVO-FC-R-20-25-8-E	20	25	8	8
G55171	EVO-FC-R-20-25-10-E	20	25	10	8
G55172	EVO-FC-R-20-25-12-E	20	25	12	8

Es posible que algunos productos o referencias no estén disponibles en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante local o con el departamento de Atención al cliente de Cook para obtener información detallada.

Parcialmente recubierto

Para mantener la permeabilidad de estenosis esofágicas malignas y para sellar fístulas traqueoesofágicas.

Se suministra estéril y es desechable; indicado para un solo uso.

Referencia	Referencia de producto	Diámetro del cuerpo (mm)	Diámetro del reborde (mm)	Longitud del stent (cm)	Diámetro del sistema de introducción (mm)
G48030	EVO-20-25-8-E	20	25	8	8
G48031	EVO-20-25-10-E	20	25	10	8
G48032	EVO-20-25-12.5-E	20	25	12,5	8
G48033	EVO-20-25-15-E	20	25	15	8

Es posible que algunos productos o referencias no estén disponibles en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante local o con el departamento de Atención al cliente de Cook para obtener información detallada.

Customer Service

EMEA: EDI - www.cookmedical.com/edi.do
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001633, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

www.cookmedical.com

Americas: EDI - www.cookmedical.com/edi.do
Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
E-mail: orders@cookmedical.com

Australia:
Phone: +61 738411188, 1800777222, Fax: +61 738411288, 1800077283
E-mail: cau.custserv@cookmedical.com

